

Corega Extra Strong Kr. mocuj.d/proteż 70g

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	70 g
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-



Opis produktu

O produkcie

Krem do mocowania proteż zębowych bez cynku, zapewniający odpowiednie uszczelnienie brzegów proteży oraz jej pewne mocowanie.

Opis:

Krem mocujący do proteż zębowych o delikatnym miętowym smaku.

Skład:

calcium-sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430.

Działanie:

Krem mocujący Corega gwarantuje mocne utrzymanie proteży zębowej przez cały dzień. Nie posiada w składzie cynku. Krem Corega uszczelnia proteżę a także zapobiega przedostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię, nawet jeśli jest dobrze wykonana i dopasowana. Tuba z kremem posiada precyzyjną końcówkę, ułatwiającą aplikację kremu. Corega dodaje pewności siebie przez cały dzień.

Sposób stosowania wyrobu medycznego:

Wskazówki dotyczące aplikacji kremu mocującego :

Umyj i dokładnie osusz proteżę. Aby uzyskać jak najlepszy efekt czyszczenia zaleca się używanie tabletek Corega Tabs.

Nanieś kilka krótkich pasków (6 mm) kremu na proteżę, niezbyt blisko jej krawędzi.

Wyplucz jamę ustną przed założeniem proteży.

Założ proteżę, dociśnij ją , następnie na kilka sekund przygrzyż.

Aby zapewnić mocne utrzymanie proteży krem należy stosować raz dziennie.

WSKAZÓWKI:

Aby nie spowodować zatkania tubki , końcówka i nakrętka powinny być suche.

Przechowywać krem mocujący w temperaturze pokojowej aby łatwo ją było wyciskać.

Bardzo gorące napoje mogą wpłynąć na zmniejszenie skuteczności kremu mocującego .

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego :

Krem może powodować nadwrażliwość lub uczulenie u niektórych osób. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu zaleca się natychmiastowe przerwanie stosowania produktu.

Uwagi i ostrzeżenia:

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

PKWIU 20.42.18.0

Rodzaj Wyrób medyczny inny

Producent:

GlaxoSmithKline