

COREGA MAX Osłona krem 40 g



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

O produkcie

OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Corega Max Osłona, krem mocujący do protez zębowych – wyrób medyczny o neutralnym smaku, z precyzyjnym aplikatorem. Przeznaczony do długotrwałego, nawet 12-godzinnego mocowania protezy zębowej. Pomaga protezie szczelnie przywierać do powierzchni, dzięki czemu wspomaga komfort podczas jedzenia i przeciwdziała dostawaniu się resztek pokarmu pomiędzy protezę i dziąsło.

SKŁAD I/LUB ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: 40 g kremu mocującego.

DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE WYROBU MEDYCZNEGO, WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA

Wyrób medyczny należy stosować w celu przymocowania protezy zębowej i równoczesnego utworzenia osłony przed dostawaniem się cząstek jedzenia pod protezę.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować raz dziennie.

Proteza całkowita (dolna lub górna): produkt aplikować w postaci długiego paska, zachowując odstęp od krawędzi protezy. W przypadku protezy górnej, należy dodatkowo nałożyć dwa krótsze paski na środku protezy. Następnie protezę umieścić w jamie ustnej i przygryźć.

Proteza częściowa: dwa krótkie paski produktu zaaplikować na każdym boku protezy, a następnie umieścić ją w odpowiednim miejscu w jamie ustnej i przygryźć.

Podczas zdejmowania protezy, pozostałości produktu należy usunąć przy pomocy miękkiej szczotki i ciepłej wody.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia dołączonej do wyrobu.

OSTRZEŻENIA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, UWAGI

Szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa stosowania znajdują się w instrukcji użycia dołączonej do wyrobu medycznego.

PRODUCENT

STAFFORD-MILLER

Youghal Road, Dungarvan, Irlandia
Co. Waterford,

