

## Corega Power Max Mocowanie + Komfort krem



Cena: 24,99 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### O produkcie

##### OPIS

Corega Power Max Mocowanie + Komfort

wyrób medyczny w postaci kremu mocującego do protez o neutralnym smaku. Produkt przytwierdza protezę nawet do 12 godzin. Neutralny smak został stworzony z myślą o osobach, które nie lubią aromatu mięty.

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tubka 40 g

#### DZIAŁANIE

Preparat zapewnia mocowanie protezy, utrzymując ją w odpowiednim miejscu nawet do 12 godzin. Precyzyjna końcówka pozwala na aplikację odpowiedniej ilości produktu. Krem pozwala zadbać o komfort dziąseł. Chroni je przed przesadnym naciskiem, tarcieniem oraz podrażnieniami.

#### SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

Sposób aplikacji kremu:

Protezę należy umyć i wysuszyć.

Nanieść krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.

Proteza górna: Nałożyć długim pojedynczym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy.

Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem.

Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski.

Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.

Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

#### PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed zastosowaniem kremu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Tylko do użytku zewnętrznego.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.



APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ  
Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów  
+48 533 352 633

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

PRODUCENT  
STAFFORD-MILLER  
Youghal Road, Dungarvan, Irlandia  
Co. Waterford,