

## Corega Super Mocny delikatnie miętowy 40g

Cena: 17,99 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### O produkcie

Opis  
Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy, krem do protez

Wyrób medyczny.  
Mocuje protezę w 3 kierunkach i utrzymuje ją cały dzień we właściwym miejscu.  
Zapobiega dostawianiu się resztek pokarmu pod protezę.  
Działa do 12 godzin.  
Posiada przyjemny delikatnie miętowy smak.  
Nie zawiera cynku.

Skład  
calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430

Wskazania  
Krem do protez Corega Super Mocny stosuje się zarówno do protez zębowych całkowitych, jak i częściowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Sposób aplikacji kremu:

Protezę należy umyć i wysuszyć.  
Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.  
Wyptukać jamę ustną przed założeniem protezy.  
Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

Sposób usuwania:

Przepłukać jamę ustną wodą.

Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.

Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.

Dokładnie oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega, a następnie opłukać wodą.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Przechowywać w temperaturze maksymalnej 30oC.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

STAFFORD-MILLER

Youghal Road, Dungarvan, Irlandia

Co. Waterford,