

## Corega Tabs Bio Formula tabl.rozp. 136tabl

Cena: 3,00 PLN



Bio Formula

136  
tab

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	136 tabl.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### O produkcie

##### Opis

Corega Tabs Bio Formula, tabletki do czyszczenia protez zębowych

##### Wyrób medyczny.

Zabijają 99,9% bakterii, które są główną przyczyną nieświeżego oddechu. Czyszczą nawet w miejscach niedostępnych dla szczoteczki. Usuwiają osad, przebarwienia oraz odświeżają protezę.

##### Skład

Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, Sodium Carbonate peroxide, TAED, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfoacetate, VP/VA Copolymer, Aroma, Subtilisin, Cellulose Gum, CI 42090, CI 73015.

##### Działanie

Tabletki Corega Tabs Bio Formula działają przeciwbakteryjnie i pomagają zapobiegać gromadzeniu się płytki bakteryjnej i kamienia oraz związanym z nimi podrażnieniom dziąseł.

System czyszczący 4w1 zawiera 4 aktywne składniki, które działając wspólnie utrzymują protezę w czystości.

##### Sposób użycia wyrobu medycznego

Wrzuć tabletkę Corega Tabs Bio Formula do pojemnika z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można było w niej całkowicie zanurzyć protezę.

Włożyć protezę do roztworu i pozostawić na 3-5 minut, a następnie wyczyścić miękką szczoteczką.

Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą. Pozostały roztwór należy wylać.

##### Przeciwwskazania i środki ostrożności

Działa silnie drażniąco na oczy.

Należy dokładnie umyć ręce po bezpośrednim ich kontakcie z tabletkami lub roztworem.

Zawiera olejek mięty pieprzowej i subtylizynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Tabletek i roztworu nie należy spożywać ani wkładać do jamy ustnej.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Roztworu nie należy połykać ani stosować do płukania jamy ustnej.

Nie dotykać oczu ani ust po kontakcie z tabletkami lub roztworem.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

#### Uwagi

W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku połknięcia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.

#### Producent

STAFFORD-MILLER

Youghal Road, Dungarvan, Irlandia

Co. Waterford,