

Novama Multicheck Pro+ Cholesterol Paski t

Cena: 60,00 PLN



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 10 szt. |
| Producent | NOVAMED.PL S.A. |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

O produkcie

PASKI TESTOWE DO BADANIA POZIOMU CHOLESTEROLU CAŁKOWITEGO 10szt
Pasujące do urządzeń z serii NOVAMA MultiCheck.

PRZEZNACZENIE

Pomiar poziomu cholesterolu całkowitego we krwi włośniczkowej z całego palca, dłoni lub przedramienia przez laików i pracowników służby zdrowia.

Pomiar poziomu cholesterolu całkowitego we krwi żyłnej lub tętniczej wyłącznie przez personel medyczny.

Tylko do diagnostyki in vitro

ZASADA DZIAŁANIA TESTU

Próbka krwi jest zasysana do strefy reakcyjnej paska pod wpływem siły kapilarnej. Kiedy przefiltrowana krew zareaguje z odczynnikami na elektrodach, miernik wykryje prąd, dostarczając potencjał. Następnie prąd zostanie przeliczony na równoważną wartość cholesterolu całkowitego w osoczu.

SKŁAD CHEMICZNY PASKÓW

Całkowita esteraza cholesterolu: <2,5 jednostki

Całkowita oksydaza cholesterolu: <2,5 jednostki

Peroksydaza: ≤1 Jednostka

Inne składniki (bufor, mediator, środek powierzchniowo czynny, stabilizator itp.): ≤ 0,02 mg

WYNIKI TESTU

Zakres pomiarowy: 100-400 mg/dL (2,59-10,35 mmol/l)

Normalny zakres dla zdrowych dorosłych: ≤200 mg/dl (5,17 mmol/l). (Zakres jest tylko punktem odniesienia).

Jeśli na ekranie wyświetla się „Lo”, całkowity poziom cholesterolu może wynosić poniżej 100 mg/dL (2,59 mmol/l).
Jeśli na ekranie wyświetla się "Hi", całkowity poziom cholesterolu może przekraczać 400 mg/dl (10,35 mmol/l).
Jeśli wynik testu jest niezwykle niski, wysoki lub niezgodny z tym, jak się czujesz, sprawdź poniższe kroki i powtórz test z nowym paskiem, upewniając się, że dokładnie przestrzegasz instrukcji.

DOKŁADNOŚĆ:

Dokładność pomiaru cholesterolu całkowitego została przeprowadzona z krwią z palca włośniczkowego i porównana z kalibratorami przyrządów referencyjnych, które były odniesione do normy NIST SRM 913.

DANE TECHNICZNE

SKU TOW017163

Kod EAN 5901793643472

BLOZ 7 9102597

Grupa produktów Analizatory krwi

Prowadzący reklamę Novamed.pl S.A

Producent General Life Biotechnology Co., Ltd.

Autoryzowany przedstawiciel MDSS GmbH

Zastosowanie Paski do pomiaru poziomu cholesterolu do urządzenia pomiarowego Novama Multicheck Pro+.

Ryzyka Kontakt ze skórą lub okiem może prowadzić do podrażnień

Marka NOVAMA

CE tak

Ilość sztuk w opakowaniu 10 sztuk

Stawka podatku VAT 8%