

Novama Multicheck Pro+ Glukoza Paski testo

Cena: 35,00 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 szt.
Producent	NOVAMED.PL S.A.
Substancja czynna	-

Opis produktu

O produkcie

PASKI TESTOWE DO BADANIA POZIOMU GLUKOZY 50szt
Pasujące do urządzeń z serii NOVAMA MultiCheck Pro+

PRZEZNACZENIE

Pomiar poziomu glukozy we krwi włosiczkowej z całego palca, dłoni lub przedramienia przez laików i pracowników służby zdrowia.
Pomiar poziomu glukozy we krwi żyłnej lub tętnicznej wyłącznie przez personel medyczny.

Tylko do diagnostyki in vitro
ZASADA DZIAŁANIA TESTU

Próbka krwi jest zasysana do strefy reakcyjnej paska pod wpływem siły kapilarnej. Kiedy glukoza we krwi reaguje z odczynnikiem na elektrodach, miernik wykryje prąd, dostarczając potencjał. Następnie prąd zostanie przeliczony na równoważną wartość glukozy we krwi w osoczu.

SKŁAD CHEMICZNY PASKÓW

Dehydrogenaza glukozowa (GDH-FAD) $\leq 1,5$ jednostki (mikroorganizm).
Inne składniki (bufor, mediator, środek powierzchniowo czynny, stabilizator itp.) $\leq 0,2$ mg
WYNIKI TESTU

Zakres pomiarowy: 20-600 mg/dl (1,1-33,3 mmol/l)

Normalny poziom glukozy przed śniadaniem: 70-105 mg/dl (3,9-5,8 mmol/l) 1 lub 2 godz.
Po posiłku: <120- 160 mg/dl (6,7-8,9 mmol/l) (zakres jest tylko informacją.)
Jeśli wyświetla się „lo”, poziom glukozy we krwi może być poniżej 20 mg/dl (1,1 mmol/l).

Jeśli wyświetla się „Hi”, poziom glukozy we krwi może przekraczać 600 mg/dl (33,3 mmol/l).
DOKŁADNOŚĆ:

Dokładność pomiaru glukozy została przeprowadzona z krwią z palca włośniczkowego i porównana z kalibratorami przyrządów referencyjnych, które były odniesione do normy NIST SRM 917. Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 15197.

DANE TECHNICZNE

SKU TOW017164

Kod EAN 5901793643496

BLOZ 7 9102598

Grupa produktów Analizatory krwi

Prowadzący reklamę Novamed.pl S.A

Producent General Life Biotechnology Co., Ltd.

Autoryzowany przedstawiciel MDSS GmbH

Zastosowanie Paski do pomiaru poziomu cholesterolu do urządzenia pomiarowego Novama Multicheck Pro+.

Ryzyka Kontakt ze skórą lub okiem może prowadzić do podrażnień

Marka NOVAMA

CE Tak

Ilość sztuk w opakowaniu 50 sztuk

Stawka podatku VAT 8%