

PEMPA 3w1 Urządzenie do pomiaru glukozy, c

Cena: 146,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Producent	PEMPA JERZY ŻUKOWSKI SP.J.
Substancja czynna	-

Opis produktu

O produkcie

Opis produktu

Chde Pempa BK6-40M 3w1 to wielofunkcyjne urządzenie do użytku domowego, które służy do pomiaru poziomu glukozy, cholesterolu oraz kwasu moczowego we krwi. Pempa 3w1 automatycznie rozpoznaje rodzaj użytego paska, dzięki czemu zapewnia dokładny i szybki pomiar przy użyciu niewielkiej próbki krwi. Wbudowana pamięć umożliwia zapamiętywanie pomiarów dla dwóch użytkowników, a duży czytelny wyświetlacz sprawia, że urządzenie jest komfortowe w użytkowaniu nawet dla osób starszych i niedowidzących.

Pempa BK6-40M urządzenie 3w1 wyróżniają niewielkie rozmiary, szybki pomiar i wielofunkcyjność, dlatego jest ono doskonałym aparatem do codziennej kontroli stanu zdrowia w warunkach domowych.

Zastosowanie

Pomiar poziomu glukozy, cholesterolu i kwasu moczowego z krwi.

Sposób użycia

Umyj i zdezynfekuj dłonie za pomocą chusteczek do dezynfekcji, upewnij się, że wytarłeś je do sucha przed rozpoczęciem pomiaru.

Włóż lancet i mocno dociśnij.

Wykręć końcówkę zabezpieczającą lancet.

Nałóż końcówkę przez zakręcenie.

Ustaw regulację głębokości wklucia.

Aby zapobiec zawilgotnieniu pasków pomiarowych, należy zamknąć wieczko opakowania natychmiast po wyjęciu paska pomiarowego.

Włóż pasek do urządzenia.

Upewnij się, że na opakowaniu pasków i wyświetlaczu znajduje się ten sam kod.

Pociągnij za spust nakłuwacza gdy jesteś gotowy do badania.

Przyłóż nakłuwacz do palca i naciśnij przycisk wyrzucania lancet.

Wytrzyj pierwszą kroplę krwi delikatnie naciskając miejsce pobrania.

Przyłóż miejsce pobrania do wlotu próbki na pasku. Próbka krwi będzie automatycznie zasysana.

Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie, urządzenie wyświetli wynik pomiaru.

Cechy produktu

kompaktowe rozmiary,
szybki i dokładny pomiar,
duży wyświetlacz,
długi czas pracy na jednej baterii,
pamięć dla dwóch użytkowników,
automatyczne rozpoznawanie pasków,
kompatybilne z paskami do pomiaru BeneCheck.

Specyfikacja techniczna

Pamięć: 460 wyników testów (360 dla pomiarów glukozy, 50 dla kwasu moczowego, 50 dla całkowitego cholesterolu).

Typ baterii: jedna bateria litowa 3V (CR2032).

Wytrzymałość baterii: około 1000 badań.

Wymiary urządzenia: 86x57x17 mm.

Waga: około 48 g.

Gwarancja

2 lata

Ważne wskazówki

Należy przeprowadzić pomiar w ciągu 5 minut, w przeciwnym razie urządzenie wyłączy się automatycznie.

Urządzenie pomiarowe nie włączy się, jeśli włożysz niewłaściwy koniec lub złą stronę paska.

Nanieś datę otwarcia na zestawie pasków, nie używaj przeterminowanych pasków.

Upuszczenie, uderzenie lub inne uszkodzenie może spowodować błędne działanie urządzenia.

Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu działania pola magnetycznego, elektromagnetycznego oraz zakłóceń radioaktywnych.

Ostrzeżenia

W przypadku utylizacji pasków oraz lancetów należy kierować się lokalnymi przepisami.

Zużyte paski pomiarowe, lancety oraz wszelkie inne materiały, które miały kontakt z próbką krwi powinny być traktowane jako potencjalne zagrożenie biologiczne.

Jeżeli użytkownik cierpi na chorobę zakaźną, paski pomiarowe i inne materiały mogą stanowić źródło zakażenia.

Lancet ani pasek pomiarowy nie mogą być używane ponownie.

Zawsze używaj certyfikowanego lancetu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Zawartość opakowania

1 x urządzenie PEMPA BK6-40M

10 x paski do pomiaru glukozy

5 x paski do pomiaru kwasu moczowego

5 x paski do pomiaru cholesterolu

igły do nakłuwacza

1 x nakłuwacz

1 x etui

1 x baterie

1 x instrukcja obsługi

Producent

Shenzen Combei Technology Co., Ltd

11-5B, No.105, Huanguan South Road

Dystrybutor

CHDE Polska Spółka Akcyjna

ul. Biesiadna 7

35-304 Rzeszów