

## Termometr bezdotykowy VISIOFOCUS 06400 Z ETUI



Cena: 319,99 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Producent	BIAT SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### O produkcie

Visiofocus® jest wzbogaconą, rozbudowaną wersją termometru Thermofocus. Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie termometr, przeznaczony do użytku prywatnego bądź lekarskiego.

Visiofocus® jest jedynym na świecie termometrem który emituje (wyświetla) temperaturę na czole badanej osoby, przedmiotu lub cieczy. System ten opracowany przez firmę Tecnimed jest chroniony wieloma patentami.

#### Cechy termometru:

Pomiar w 1 sekundę.

Pomiar temperatury obiektów.

9 pamięci.

Sensor odległości - wystarczy umieścić cyfry pomiędzy dwoma łukami.

Auto-wyłączanie.

Możliwość zmiany jednostki pomiaru.

Termometru nie trzeba włączać – jest zawsze gotowy do pracy.

Po dokonany pomiarze od razu można wykonać kolejny pomiar.

Posiada dwa tryby kalibracji : manualną (MQCS) i automatyczną (AQCS).

Pomiar na środku czoła, powiece (oku), żyły szyjnej.

Przyciski są specjalnie podgumowane i ułożone w taki sposób, aby pomiar temperatury nie stanowił żadnego problemu.

Kapturek ochronny z przodu zabezpiecza termometr przed kurzem oraz chroni mierniki przed uszkodzeniem.

Duży, czytelny i kolorowy wyświetlacz LCD.

#### Metody pomiaru przez Visiofocus 06400:

czoło: Idealne miejsce do pomiaru temperatury. Bez włosów, blisko mózgu, który jest najważniejszym i delikatnym narządem w organizmie. W zależności od tego, co spowodowało gorączkę, zwykle głowa jest pierwszym miejscem, gdzie wzrasta temperatura.

powieka: Zalecany pomiar u osób, które mają spoconą skórę na czole. Zalecany również dla osób z pomarszczoną skórą na czole, gdzie

pomiar temperatury może okazać się niewłaściwy.

żyła szyjna: Pomiar dokonujemy ok. 1 cm poniżej ucha (u dzieci), ok. 2 cm poniżej ucha (dorośli) i przesuwając termometr podczas pomiaru do 5 cm prostopadle do szyi.

Posiada następujące funkcje:

przycisk „BUŻKA”, za pomocą którego dokonujemy pomiarów temperatury z czoła pacjenta, powieki lub żyły szyjnej

przycisk „DOM”, który pozwala na mierzenie temperatury dowolnych przedmiotów i cieczy

przycisk pamięci „MEM”, za pomocą którego możemy odczytać 9 ostatnich pomiarów dokonanych termometrem.

W termometrze istnieje możliwość wyboru 3 różnych trybów pomiaru (oralny, odbytniczy i pachwinowy)

Visiofocus posiada dwa tryby kalibracji : manualną (MQCS) i automatyczną (AQCS)

Różne kolory wyświetlacza zostały przypisane określonym funkcjom:

błękitny – wyświetlany jest przy pomiarze z użyciem przycisku „BUŻKA” (pomiar temperatury ciała na środku czoła, powiece lub żyły szyjnej)

zielony – wyświetlany jest przy pomiarze z użyciem przycisku „DOM” (pomiar temperatury obiektów)

fioletowy – gdy aktywowana jest funkcja pamięci (kiedy termometr jest w trybie stand-by należy dwukrotnie lub więcej wcisnąć przycisk „MEM” („PAMIĘĆ”)

pomarańczowy – kiedy urządzenie jest w trybie stand-by należy jednokrotnie nacisnąć przycisk „MEM” („PAMIĘĆ”) i zostanie wyświetlona temperatura pokojowa

niebieski – kiedy aktywowana jest procedura ręcznej kalibracji MQCS

Żywotność termometru oceniana jest na: 10 lat

W zestawie:

Termometr Tecnimed Visiofocus 06400

4 x baterie AAA

Instrukcja w języku polskim

Gwarancja 24 miesiące

Etui na termometr

DYSTRYBUTOR:

BIAT Rzeszów