

URGO Elektrostymulator do ładowania urządź

Cena: 199,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

O produkcie

OPIS

Technologia medyczna TENS (ang. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, przezskórna neurostymulacja elektryczna) przynosi ulgę w bólu dzięki zastosowaniu prądu elektrycznego o specjalnie dobranym natężeniu. Jest to metoda niewymagająca stosowania leków, codziennie wykorzystywana w ośrodkach leczenia bólu. Niezależnie od dolegliwości, elektroterapia TENS nie leczy przyczyn bólu, ale zmniejsza lub usuwa ból mięśni i stawów. Prąd elektryczny jest przesyłany przez elektrody (obwód elektryczny z elementem żelowym) umieszczone na powierzchni skóry. Powoduje on elektryczne pobudzenie nerwów. Podwójny efekt redukcji bólu: NATYCHMIASTOWE: ograniczenie przesyłania sygnałów bólowych do rdzenia kręgowego, określone inaczej jako efekt „bramkowania” (ang. gate control), DŁUGOTRWALE: zwiększenie wydzielania endorfin, naturalnych hormonów przeciwbólowych wytwarzanych przez mózg. Leczenie metodą elektroterapii umożliwia natychmiastową i długotrwałą ulgę w bólu. Wszystkie programy elektroterapii są skuteczne: zostały przetestowane naukowo, a technologia została zatwierdzona przez instytucje medyczne.

KATEGORIA PRODUKTU

Wyrób medyczny

WSKAZANIA

bóle mięśniowe (opóźniona bolesność mięśni, przykurcze, bóle pleców, lumbago, kręcz karku itp.);
 bóle stawowe (choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, itp.);
 neuralgie (rwa kulszowa, rwa szyjno-barkowa, rwa udowa) po konsultacji z lekarzem;
 bóle urazowe (skręcenie, zapalenie ścięgien, naciągnięcie itp.) po konsultacji z lekarzem..

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.
 Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie elektrostymulatora.

Film pokazujący sposób użycia oraz obsługę urządzenia można znaleźć na stronie www.urgotens.pl

ZSETAW ZAWIERA:

- urządzenie
- 2 nakładki z zabezpieczeniem
- ładowarkę USB

PRZECIWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie nakładać: w okolicy serca, na klatce piersiowej, z przodu ani z boku szyi (tętnica szyjna, gardło), w okolicy genitaliów, na głowę. Nie stosować u osób: z wszczepionym urządzeniem (rozrusznik, pompa insulinowa, glukometr do monitorowania glikemii, defibrylator itp.), ze zmianami skórnymi na obszarach tych zmian (podrażniona skóra, wysypka skórna, rana pooperacyjna, świeża blizna, obecność zszwynek, rana urazowa, owrzodzenie żyłne lub tętnicze, owrzodzenie cukrzycowe, oparzenia itp.), z ciężką niewydolnością żylną (żylaki, zapalenie żył, zapalenie żył głębokich, owrzodzenie żylakowe) lub z zakrzepicą tętniczą na obszarach objętych schorzeniem, z upośledzoną wrażliwością skóry (niektórzy chorzy na cukrzyce, osoby w podeszłym wieku) na obszarach objętych schorzeniem, z chorobami nowotworowymi w obrębie zmian nowotworowych lub zakażonych lub w ich pobliżu, w ciąży na brzuch, w ciąży na plecy bez konsultacji z lekarzem, z epilepsją w obrębie głowy, szyi i ramion.

Informacje dla użytkownika lub pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem: Szczegółowe informacje, w tym również ryzyko związane z zastosowaniem produktu URGO Elektrostymulator do ładowania, zostały opisane w ulotce dołączonej do opakowania.

PRODUCENT

JKH Health Co., Ltd., 4-5F, Building 12, Hengmingzhu Industrial Park, Xinqiao Tongfuyu Industrial Area, Shajing, Baoan, Shenzhen, Chiny
Autoryzowany przedstawiciel w UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Ei_estrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy

Dystrybutor

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

www.urgo.pl